



PHILIPS

RESPIRONICS

Amara View

Contacto mínimo

Mascarillas
faciales completas

Nota alta en **rendimiento**,
sin dejar marcas en el
puente nasal




Disfrute la vista

El campo de visión más amplio entre todas las mascarillas faciales completas líderes del mercado.

Una idea a la que le ha llegado su momento. El increíble diseño bajo la nariz de Amara View la convierte en la única mascarilla que no deja marcas en el puente nasal, al compararla con las máscaras líderes del mercado. También es la más pequeña y liviana[†] y ofrece el campo de visión más amplio entre las mascarillas faciales completas líderes del mercado. Le resultará fácil usar anteojos, leer, ver la televisión y usar una computadora o tableta antes de dormir.*

Características Primeros pasos

- Su innovador diseño previene marcas, malestar e irritación en el puente nasal*
- Es la más pequeña y liviana[†] de todas las mascarillas faciales completas líderes del mercado
- Ofrece el más amplio campo de visión de todas las mascarillas faciales completas líderes del mercado*
- Permite usar anteojos, leer y ver televisión
- Fácil de usar con un marco modular para todos los tamaños de almohadilla
- Sin almohadillas y marcos voluminosos delante del rostro y los ojos

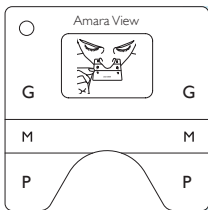

A diferencia de la mayoría de las mascarillas faciales completas, Amara View incluye un indicador de tamaño para medir la profundidad de la nariz y determinar el tamaño de la almohadilla que necesita.



La mascarilla Amara View cubre una menor parte del rostro del paciente que todas las otras las mascarillas faciales completas líderes del mercado*

Con su maravilloso diseño innovador, solo Philips Respironics puede ofrecer la opción más pequeña y liviana con el campo de visión más amplio entre las mascarillas faciales completas líderes del mercado.

*Pruebas internas, datos en archivo

†Sin tubo de rápida liberación

Comuníquese con un representante de Philips Respironics para obtener más información acerca de la forma en que Amara View puede comenzar a marcar la diferencia para sus pacientes y su negocio.

Objeto	Número de pieza
Mascarilla Amara View pequeña con soporte craneal	1090602
Mascarilla Amara View mediana con soporte craneal	1090603
Mascarilla Amara View grande con soporte craneal	1090604
Mascarilla Amara View pequeña sin soporte craneal	1090612
Mascarilla Amara View mediana sin soporte craneal	1090613
Mascarilla Amara View grande sin soporte craneal	1090614
Piezas de recambio	Número de pieza
Tubo de rápida liberación para la mascarilla Amara View	1090689
Almohadilla pequeña para la mascarilla Amara View	1090692
Almohadilla mediana para la mascarilla Amara View	1090693
Almohadilla grande para la mascarilla Amara View	1090694
Soporte craneal para la mascarilla Amara View, tamaño grande	1090696
Soporte craneal para la mascarilla Amara View, tamaño estándar	1090697
Clip del soporte craneal para la mascarilla Amara View, 2 pk	1090698
Indicador de tamaño para la mascarilla Amara View	1090699

La RESPUESTA

Transforme su negocio de la forma más fácil

La RESPUESTA fue diseñada para responder a los desafíos sin precedentes que hoy enfrentan los proveedores de equipos médicos duraderos (DME). Este fácil proceso de 3 fases afecta cada punto de contacto en la trayectoria del paciente, desde la configuración, hasta el cumplimiento, a través del resuministro continuo. La mascarilla facial completa Amara View, una parte de la RESPUESTA, es nuestra última innovación en tecnología de mascarillas, desarrollada para trabajar junto con nuestros sistemas terapéuticos y servicios de resuministro para transformar su negocio de la manera más fácil.

Guía de ajuste de la mascarilla Amara View

Es fácil lograr el ajuste adecuado con esta mascarilla. Solo siga las indicaciones que figuran a continuación para comenzar. Para obtener instrucciones de ajustes adicionales, consulte la guía OIS.



1

Afloje y agrande el soporte craneal, luego presione los clips del soporte craneal y extráigalos del marco para desconectarlo.



2

Sostenga la mascarilla sobre su rostro. Coloque la mascarilla debajo de su nariz y sobre los orificios para las fosas nasales de la almohadilla. Empuje hacia arriba la almohadilla de la mascarilla.

(Nota: No coloque la mascarilla sobre la nariz o la nariz en la abertura para las fosas nasales).



3

Tire de las correas de la mascarilla sobre su cabeza.



4

Coloque en su lugar los clips del soporte craneal para conectar la máscara.



5

Hale hacia atrás las lengüetas del soporte craneal para ajustar las correas inferiores y superiores. Hale hacia atrás la lengüeta para ajustar la correa de la corona.



6

Conecte el tubo flexible (incluido con su CPAP o dispositivo de dos niveles) al tubo de rápida liberación de Amara View.

Obtenga más información

Obtenga más información acerca de los motivos por los que Amara View es la nueva elección en mascarillas faciales completas.

Visite www.philips.com/amaraview



©2016 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o sus respectivos dueños.

www.philips.com/amaraview

Philips Respiration
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 Estados Unidos

Product TS 3/25/16 MCL 4107055